

EL TORO GENÉTICA - FICHA TÉCNICA

DESCONGELADOR DE PAJILLAS CITO (KIT COMPLETO)

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El descongelador CITO es una herramienta de alta precisión diseñada para la inseminación artificial bovina. Permite un descongelamiento uniforme y controlado del semen, garantizando la máxima viabilidad de las muestras genéticas.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: CITO
- Modelo: Monitor (Automático/Manual)
- Capacidad: 420 cc
- Temperatura: 96.6 F (36 C)
- Voltaje Dual: 120V AC / 12V DC (Vehículo)
- Material: Carcasa de alta resistencia con aislamiento térmico.

3. COMPONENTES DEL KIT

- Unidad central de descongelación (Azul).
- Cable de alimentación 120V AC.
- Cable de alimentación 12V DC (para encendedor de auto).
- Cesta de pajillas (Elevador Grid Removable).
- Cesta de salida de pajillas.
- Termómetro de Tarjeta (Monitor).
- Manual de instrucciones.

4. GUÍA RÁPIDA DE USO

1. Llenar con agua limpia hasta 420cc.
2. Conectar y verificar temperatura con el termómetro monitor (96.6 F).
3. Insertar las pajillas en la cesta y esperar el tiempo indicado (30-40 seg).
4. Limpiar con un paño húmedo después de cada uso.